



ÁCIDO PERACÉTICO 5% GALENO

ÁCIDO PERACÉTICO 5% GALENO é indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginos*;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Preparar uma solução na concentração de 1:24 (ou seja, diluir 1ml de produto em 24ml de água).

Para desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar a solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos na solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Importante: Usar luvas para sua aplicação.

IMPORTANTE: Por ser um oxidante forte e muito reativo é preciso tomar precauções ao manipular o produto. Utilizar EPI's (botas, luvas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições. Manusear com ventilação adequada. Não é corrosivo à superfície de aço inox, alumínio, estanho, zinco, teflon, polietileno, revestimentos sintéticos, esmaltados ou borrachas. Evitar contato com material orgânico: madeira, papelão, cobre e bronze.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

pH (solução 1%): 0,0 – 3,0

Aparência: Líquido Límpido

Cor: Incolor

Odor: Característico

Concentração de Ácido Peracético: 4,5 – 5,5%

COMPOSIÇÃO

Peróxido de Hidrogênio, ácido acético, acidificante, estabilizante e veículo.

Princípio ativo: Ácido Peracético 5,0% p/p.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA A EMBALAGEM PROTEGIDA DO SOL E DO CALOR. Temperaturas elevadas podem desestabilizar o produto. Mantenha o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água



ÁCIDO PERACÉTICO 5% GALENO

durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém peróxido de hidrogênio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. **“Água: pode faltar. Não desperdice.”**

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L.

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0049.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831