



HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% GALENO

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% GALENO é indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginos*;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Preparar uma solução na concentração de 1:3 (ou seja, diluir 500 ml de produto em 1500 ml de água).

Para desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar a solução deixando em contato por 5 minutos. Enxaguar se necessário.

Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos na solução deixando em contato por 5 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Importante: Usar luvas para sua aplicação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

pH (tal qual): 10,5 – 13,5

Aparência: Líquido Límpido

Cor: Incolor a levemente amarelado

Odor: Característico

Teor de Cloro: 2,25 – 2,75%

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de Sódio, estabilizante e veículo.

Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio 2,5% p/p.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA O FRASCO PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR. Manter o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remover o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo os respingos do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não reutilizar a embalagem vazia. “Água: pode faltar. Não desperdice.”



Informações Técnicas

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% GALENO

ATENÇÃO: Não aplicar em superfícies metálicas e mármore devido a oxidação causada pelo cloro. Não misturar com outros produtos. A mistura com ácido ou produto à base de amônia produz gás tóxico.

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L.

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0055.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831