



START BG

START BG é um desinfetante bactericida indicado exclusivamente para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde. Possui agentes químicos capazes de destruir microorganismos na forma vegetativa existentes em superfícies inertes que entram em contato com tecidos vivos e que não podem ser desinfetados por métodos físicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS com amplo espectro de ação, indicado para instrumentos cirúrgicos médico-hospitalares, odontológicos e uso em geral (pisos, paredes e bancadas);
- ❖ Produto econômico, pois permite diluições e economiza no transporte e armazenamento;
- ❖ Menor custo real por poder de desinfecção;
- ❖ Ação bactericida frente às seguintes cepas: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Salmonella choleraesuis* e *Staphylococcus aureus*;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Utilize uma solução de **START BG** a 1% (ou seja, dilua 1L de **START BG** em 100L de água). Após a limpeza da superfície e instrumentos a serem sanitizados, aplique a solução por imersão ou aspersão e deixe agir por 10 minutos. O produto também pode ser pulverizado em paredes e equipamentos. Não é necessário enxaguar.

Importante: É recomendável o uso de EPI's (botas, luvas, óculos de segurança e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

Odor: Inodoro

Densidade: 1,0170 g/cm³

pH (tal qual): 5,5 – 6,5

COMPOSIÇÃO

Cloridrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB), tensoativo não iônico, sequestrante e veículo. **Princípio ativo:** Cloridrato de Polihexametileno Biguanida 8,0%.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. ATENÇÃO! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos, contato com a pele. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômitos e procure um Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los.

ATENÇÃO: Não misturar com outros produtos a base de tensoativos aniônicos (Exemplo: detergentes).

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L.

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0297

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831