

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 83
		Data de elaboração	09/10/2025
		Data de efetivação	09/10/2025
		Revisão	01
		Página	1 de 2

DESINFETANTE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5G GALENO

FINALIDADE

DESINFETANTE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5G GALENO é indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Possui em sua formulação uma mistura de moléculas de quaternário de amônio de 5ª geração;
- Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus.
- Alta diluição 1:200;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Preparar uma solução na concentração de 1:200, ou seja, diluir 10mL do **DESINFETANTE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5G GALENO** em 2L de água.

Para desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar a solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos na solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar. Utilizá-los o mais breve possível.

Importante: Use luvas ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido Límpido

Cor: Levemente Amarelado

Odor: Característico

pH (tal qual): 6,0 – 8,0

Teor de Ativo (%): 28,576 – 31,584

Densidade: 0,970 g/cm³

Viscosidade dinâmica: 16 cP

COMPOSIÇÃO

Cloreto Alquil (C12-C16) Dimetil Benzil Amônia / Cloreto Didecil Dimetil Amônio, tensoativo não iônico, sequestrante, conservante e veículo.

Princípio ativo: Cloreto Alquil (C12-C16) Dimetil Benzil Amônia / Cloreto Didecil Dimetil Amônio – 30,08% p/p.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 14/11/2025
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTA DOCUMENTO, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 83
		Data de elaboração	09/10/2025
		Data de efetivação	09/10/2025
		Revisão	01
		Página	2 de 2

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação remova a pessoa para local arejado. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica 24 horas - 0800 0148110. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Não reutilizar a embalagem vazia.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1L e 5L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0052.

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80
Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ
Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96
Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831
Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100
sac@startquimica.com.br