

 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 236
		Data de elaboração	04/03/2026
		Data de efetivação	04/03/2026
		Revisão	01
		Página	1 de 2

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% START

FINALIDADE

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% START é um desinfetante bactericida indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Indicado para a desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos;
- Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- Menor custo real por poder e tempo de desinfecção;
- Desinfetante de uso hospitalar;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Produto pronto uso. Para desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto puro deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imersão no produto puro deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

ÁREAS	DILUIÇÃO	TEMPO DE CONTATO
Superfícies fixas	Puro (10.000 ppm)	10 minutos

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E MÁRMORES DEVIDO A OXIDAÇÃO CAUSADA PELO CLORO. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS. NÃO UTILIZAR PARA A DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ALIMENTOS. ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Teor de Cloro: 0,85 – 1,15%

Aparência: Líquido Límpido

Cor: Incolor a Levemente Amarelado

pH (tal qual): 10,5 – 13,5

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de Sódio, Estabilizante e Veículo.

Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio 1% p/p de cloro ativo

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 6/3/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHER S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 236
		Data de elaboração	04/03/2026
		Data de efetivação	04/03/2026
		Revisão	01
		Página	2 de 2

PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA O FRASCO PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR. Manter o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso. Não reutilizar as embalagens.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remover o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo os respingos do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110.

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1L e 5L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0309.

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
 Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80
 Av. Almirante Barroso, 22 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ
 Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96
 Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG
 INDÚSTRIA BRASILEIRA
 Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831
 Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6
 SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100
sac@startquimica.com.br